

Einstufen-Peroxid System mit Platinkatalysator für alle Kontaktlinsen

Zum Reinigen, Desinfizieren, Neutralisieren und Aufbewahren aller Kontaktlinsen.
Entfernt Proteine.



Kraftvolle Reinigung und hohe Desinfektionswirkung

Tiefenreinigende Wirkung: löst Ablagerungen und Verunreinigungen und unterstützt die Proteinentfernung



Frei von Konservierungsstoffen



Einfache Anwendung durch praktischen Behälter mit integriertem Platinkatalysator

Sicher, leistungsstark und komfortabel

Anwendung

1. Hände waschen

Bevor Sie Ihre Kontaktlinsen berühren, waschen Sie die Hände sorgfältig und trocknen Sie sie mit einem sauberen Handtuch ab.

2. Kontaktlinsen in Behälter legen

Öffnen Sie den Behälter und legen Sie die rechte und linke Linse in die entsprechende Halterung mit dem Buchstaben "R=weiß" bzw. „L=blau“.

3. Behälter befüllen

Füllen Sie den Behälter bis zur Markierungslinie mit der Peroxidlösung. Achten Sie darauf, dass der Behälter nicht zu wenig bzw. übermäßig befüllt wird und verchließen Sie ihn.

4. Desinfektion und Neutralisation

Die Kontaktlinsen müssen **mindestens 6 Stunden** oder über Nacht in der Lösung zur Desinfektion und Neutralisation aufbewahrt werden. Bewahren Sie den Behälter immer stehend auf. Nach der Neutralisation können die Kontaktlinsen wieder getragen werden.

5. Behälterpflege

Nach dem Aufsetzen der Kontaktlinsen schütten Sie die gebrauchte Lösung weg, spülen Sie den Behälter und die Linsenhalterung mit Peroxid- oder Kochsalzlösung ab und lassen Sie beides an der Luft trocknen.

WICHTIG:

Verwenden Sie immer den mitgelieferten Kontaktlinsenbehälter mit Platinkatalysator.