

## Premium All in One Lösung mit natürlichen Inhaltsstoffen

Zum Reinigen, Desinfizieren,  
Aufbewahren, Abspülen und Benetzen  
aller weichen Kontaktlinsen.  
Entfernt Proteine.



### Natürlich und schonend

Überragender Komfort durch eine  
Wirkstoffkombination aus der  
Natur:



- **Hyaluron** für optimalen Augenschutz und lang anhaltende Benetzung
- **HEC** (Zellulose) für ein sanftes Gefühl beim Aufsetzen der Linse
- **Echinacea Stammzellen** und **Sonnenblumen Lezithin** spenden Feuchtigkeit, beruhigen und schützen die Hornhaut



### Wirksame Reinigung und Desinfektion

Für empfindliche Augen geeignet.

# Anwendung



## 1. Hände waschen

Bevor Sie Ihre Kontaktlinsen berühren, waschen Sie die Hände sorgfältig und trocknen Sie sie mit einem sauberen Handtuch ab.



## 2. Manuelle Reinigung

a. Nehmen Sie eine Kontaktlinse vom Auge und legen Sie diese auf Ihre Handinnenfläche. Geben Sie einige Tropfen **BIOcare** auf jede Seite der Kontaktlinse.



b. Reiben Sie sie vorsichtig mit kreisenden Bewegungen einige Sekunden. Spülen Sie die Kontaktlinsen nochmals gründlich mit **BIOcare** ab.



## 3. Behälter befüllen

Legen Sie die Kontaktlinse in den Linsenbehälter und füllen Sie diesen mit **BIOcare** auf.



## 4. Desinfektion und Aufbewahrung

Bewahren Sie die Linsen mindestens 4 Std. oder über Nacht in der Lösung auf. Bevor Sie die Kontaktlinsen aufsetzen, spülen Sie diese noch einmal mit **BIOcare** ab.

### TIPP: Behälterpflege

Die gebrauchte Lösung aus dem Behälter entleeren. Den Behälter mit **BIOcare** spülen und danach trocknen lassen. Zum Ausspülen niemals Leitungswasser verwenden!