



individual<sup>®</sup>

Individuelle weiche Kontaktlinsen



# Ihre Vorteile

## Jedes Auge ist anders...

... und manchmal sind Augen sogar ganz anders!

Ihr Kunde möchte gerne weiche Kontaktlinsen tragen, aber seine Werte liegen außerhalb des Standard-Lieferbereiches der meisten weichen Kontaktlinsen? Hier können Sie punkten, mit der Individual Kontaktlinsen Familie: maßgefertigte Kontaktlinsen mit einem so großen Lieferbereich, dass Sie für nahezu jeden Kunden die passende Linse finden werden.

**Ihre Kunden werden begeistert sein!**



## Ihre Vorteile

- Umfassende Parameterauswahl:  
sphärisch, torisch, multifokal, torisch multifokal
- Zwei Materialien (Silikon-Hydrogel und Hydrogel)
- Einfache und schnelle Berechnung mit **easyfit**
- Individuelle Maßanfertigung für Ihre Kunden
- Schnelle Lieferung (5 Arbeitstage)

## Einsatzbereich

Kunden, die aufgrund Topographie, Hornhautdurchmesser und Refraktion nicht mit Standard-Austauschlinsen versorgt werden können.

## Hohe Kundenzufriedenheit

- ▶ Für nahezu jedes Auge eine weiche Kontaktlinse
- ▶ Hohe Erfolgsquote
- ▶ Hohe Kundenbindung
- ▶ Zügiger Abschluss der Anpassung

## 1001 Möglichkeiten:

- Sphärisch, torisch, multifokal, multifokal torisch
- +25,00 bis -25,00 Dioptrien
- Basiskurven von 7,00 bis 9,50 mm in 0,10 mm Abstufungen
- Achslagen in 1° Abstufungen

# Wichtige Tipps für Ihre erfolgreiche Anpassung

## Individual

- Silikon-Hydrogel
- Wassergehalt 74% (FDA Gruppe II)
- Dk 60
- 3-Monatstausch
- UV Filter
- Handlingstint blau

Bitte verwenden Sie zur  
Pflege der Individual  
kein Peroxid-System

## Anpassempfehlung:

Sphärisch/Multifokal sphärisch

Basiskurve (mm)	Durchmesser (mm)
HH-Radius Mittelwert +0,30 mm	HH-Durchmesser +2,20 mm

Torisch/Multifokal torisch

Basiskurve (mm)	Durchmesser ist basiskurvenabhängig	
	Basiskurve (mm)	Durchmesser (mm)
HH-Radius flach	≤ 7,70	13,90
	7,80 bis 8,20	14,20
	≥ 8,30	14,50

## Berechnung mit easyfit



Kostenloser Download auf  
[www.menicon-service.com/downloads](http://www.menicon-service.com/downloads)

## Individual72

- Hydrogel
- Wassergehalt 72% (FDA Gruppe II)
- Dk 34
- 6-Monatstausch
- Handlingstint Aqua-green

## Anpassempfehlung:

Sphärisch/Multifokal sphärisch

Basiskurve (mm)	Durchmesser (mm)
HH-Radius flach +0,60 mm	HH-Durchmesser +2,40 mm

Torisch/Multifokal torisch

Basiskurve (mm)	Durchmesser (mm)
HH-Radius Mittelwert +0,60 mm	HH-Durchmesser +2,70 mm

## Pflegeempfehlung:

### SOLOCARE AQUA®

- ProVitamin B5 (Dexpanthenol) unterstützt die Regeneration der Hornhaut
- Sorbitol sorgt für exzellente Benetzung
- Antibakterieller Kontaktlinsenbehälter gibt zusätzliche Sicherheit
- Schnelle Desinfektion in nur 5 Minuten




# Lieferbereich

	Individual	Individual 72	Abstufungen
Basiskurve	7,40 mm bis 9,50 mm	7,00 mm bis 9,50 mm	0,10 mm
Durchmesser	13,00 mm bis 15,00 mm	13,50 mm bis 15,50 mm	0,10 mm
Sphäre	-25,00 dpt bis +25,00 dpt	-25,00 dpt bis +25,00 dpt	0,25 dpt
Addition	+1,00 dpt bis +3,00 dpt	+1,00 dpt bis +3,00 dpt	0,50 dpt
Zylinder	-0,75 dpt bis -5,00 dpt	-0,75 dpt bis -3,00 dpt	0,25 dpt
Zylinder (multifokal-torisch)	-0,75 dpt bis -3,00 dpt	-0,75 dpt bis -3,00 dpt	0,25 dpt
Achsen	0° bis 180°	0° bis 180°	1°


## Design

Blick von außen  
auf die Linse


Stabilisierungsmarkierung  
bei allen torischen Varianten:  
In 0° und 180° befindet sich  
ein einfacher Strich, in 270°  
drei Striche. (Abstand 15°Grad).

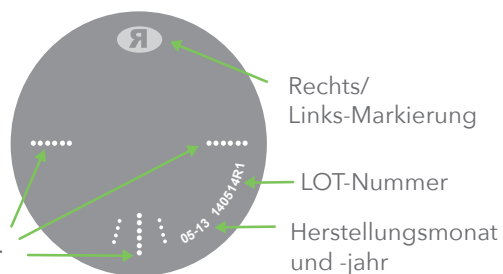

**Multifokal**  
Simultansystem  
Zentrale Fernzone

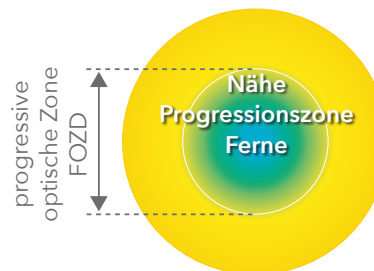

**Individual Toric**  
Dynamische Stabilisierung,  
asymmetrisch angeordnet

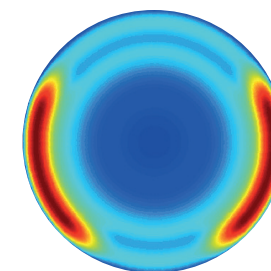

**Individual 72 Toric**  
Prismatische Stabilisierung

