



# Miru 1day - Tageslinsen




## SMART TOUCH™

### Einzigartige Verpackung für hygienische Handhabung

Alle Menicon Tageslinsen-Blister werden mit der Smart Touch™ Technologie hergestellt. Dieses innovative Verpackungsdesign stellt sicher, dass die Innenfläche der Linse bei der Handhabung nicht berührt und somit nicht kontaminiert wird. Der Träger berührt nur die Außenfläche der Linse.

#### Smart Touch™

Die einzigartige „Smart Zone“ im Blister stellt sicher, dass die Innenseite der Linse nach unten zeigt. So kann die Linse entnommen und aufgesetzt werden, ohne die Innenseite zu berühren.

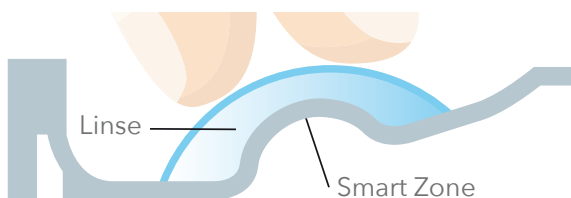


#### Herkömmlicher Blister

In herkömmlichen Blistern zeigt die Innenfläche der Linse nach oben. Dies erhöht die Möglichkeit einer Kontamination der Innenfläche bei der Handhabung.




### Smart Touch™ Linsen sind sauberer

Konventionelle Verpackung

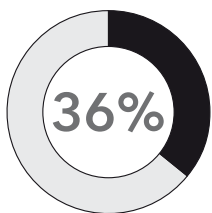

Smart Touch™

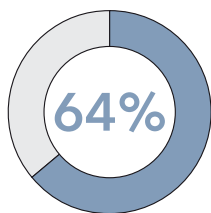

■ Kontaminationsfrei ■ Kontaminationsfrei

Randomisierte kontralaterale Studie ohne Kontaktlinsenabgabe (n=25). Die Probanden setzten die Kontaktlinsen gemäß den Anweisungen auf. 45 Minuten später wurde die mikrobielle Kontamination auf der Innenfläche der Linse untersucht. Die Grafik zeigt den Anteil der kontaminationsfreien Linsen. Fiona Stapleton. BCLA Clinical Conference & Exhibition 2019.

# 91%

der Träger von Smart Touch™ Linsen finden, dass es ein Vorteil ist, dass die Linse immer „richtig herum“ im Blister liegt.<sup>1</sup>

1. Menicon Data on File

# 92%

der Träger von Mehrstärkenlinsen räumen ein, dass sie ihre Linsen schon einmal **umgestülpt** getragen haben.<sup>1</sup>

1. Menicon Data on File




# Handhabung Smart Touch™

## Miru 1day UpSide Silikon-Hydrogel Tageslinse



Schauen Sie ein Video:

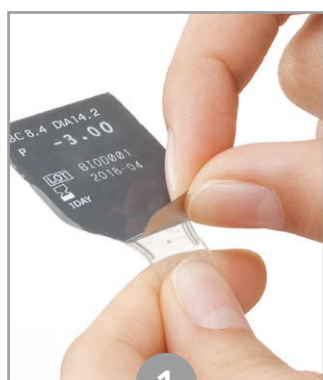

1

### Öffnen

Sie den Blister, indem Sie die Folie ganz abziehen.



2

### Greifen

Sie die Linse mit Daumen und Zeigefinger.



3

### Positionieren

Sie die Linse auf Ihrem Zeigefinger. Sie liegt richtig herum.



4

### Aufsetzen

und komfortables Sehvergnügen genießen.

## Miru 1day Flat Pack Hydrogel Tageslinse




Schauen Sie ein Video:



Beim Öffnen des Blisters zeigt die Außenseite der Linse stets nach oben



Es ist nicht nötig, die Innenseite der Linse anzufassen

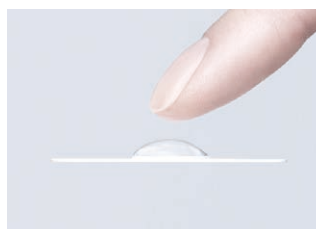

Das Verunreinigungsrisiko für die Innenseite der Linse ist gering



Eine einfache und schnelle Handhabung sorgt für optimale Hygiene