



Kontaktlinsen- Pflege

für formstabile Kontaktlinsen



Perfekt gepflegte und komfortable Kontaktlinsen

Damit Ihre Kontaktlinsen komfortabel und Ihre Augen gesund bleiben, ist es wichtig, dass Sie Ihre Linsen nach jedem Tragen gründlich reinigen. Dies dauert nur wenige Minuten, und Ihre Augen werden es Ihnen danken. Saubere Kontaktlinsen werden besser benetzt, fühlen sich angenehmer an und bieten dauerhaft ein uneingeschränktes Sehvergnügen.

Bitte beachten Sie die Hinweise Ihres Kontaktlinsenspezialisten und die Packungsbeilage des Pflegemittels.

MeniCare Pure - tägliche Pflege

Nutzen Sie MeniCare Pure zur **täglichen** Reinigung, Desinfektion, Aufbewahrung, sowie zum Abspülen und Benetzen Ihrer Kontaktlinsen.



- Besonders schonend durch natürliche Inhaltsstoffe
- Zuverlässige Desinfektion und effektive Reinigung
- Hervorragender Tragekomfort und gute Benetzung



Progent Intensivreiniger - 1× wöchentlich



Damit Ihre Kontaktlinsen frei von Proteinablagerungen und hartnäckigen Verschmutzungen bleiben, verwenden Sie **1× wöchentlich** den Progent Intensivreiniger.

- Entfernt zuverlässig Proteinablagerungen und andere Verunreinigungen von der Kontaktlinsenoberfläche
- Sichere Desinfektionsleistung

SPRAY&CLEAN - bei Bedarf täglich


Wenn Sie zu lipidhaltigem und öligem Tränenfilm neigen, dann nutzen Sie **täglich** SPRAY&CLEAN, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen mit MeniCare Pure reinigen.



- Entfernt effektiv hartnäckige Lipidablagerungen von der Kontaktlinsenoberfläche
- Langanhaltender Tragekomfort und klare Sicht
- Ohne Konservierungsstoffe



So geht's:

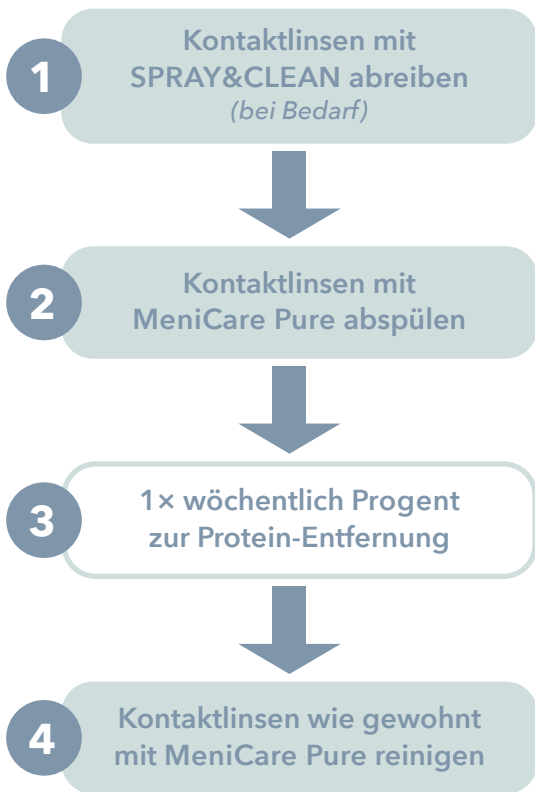

Praxisstempel:

Anwendung

MeniCare Pure:

1. Kontaktlinsen in die Handinnenfläche legen.
2. Jede Kontaktlinse für 20 Sekunden mit einigen Tropfen MeniCare Pure abreiben.
3. Kontaktlinsen in die Linsenhalterung einsetzen und mit MeniCare Pure abspülen.
4. Linsenbehälter mit MeniCare Pure füllen und die Kontaktlinsen mindestens 30 Minuten oder über Nacht einlagern.
5. Vor dem Aufsetzen nochmals mit MeniCare Pure abspülen.

Progent Intensivreiniger:

1. Kontaktlinsen mit MeniCare Pure oder SPRAY&CLEAN sorgfältig abreiben und abspülen.
2. Kontaktlinsen in die Deckelhalterung des Progent-Behälters einsetzen.
3. Diesen mit je einer Ampulle A und B auffüllen und gut verschließen.
4. Den Behälter vorsichtig schütteln.
5. Kontaktlinsen für **maximal 30 Minuten** in der Progent-Lösung lagern.
6. Anschließend mit MeniCare Pure abspülen. Entweder wie gewohnt einlagern oder gleich wieder tragen.



ACHTUNG: Die Progent-Lösung darf niemals ans Auge gelangen!



SPRAY&CLEAN:

1. Je ein Sprühstoß SPRAY&CLEAN auf beide Kontaktlinsenseiten geben.
2. Die Linsen vorsichtig mit dem Zeigefinger in der Handinnenfläche oder zwischen den Fingern reiben.
3. Folgen sie ab hier den Pflege-schritten 3-5 unter MeniCare Pure!



ACHTUNG: SPRAY&CLEAN nicht ins Auge sprühen!

Waschen Sie sich immer gründlich die Hände bevor Sie Ihre Kontaktlinsen berühren.

